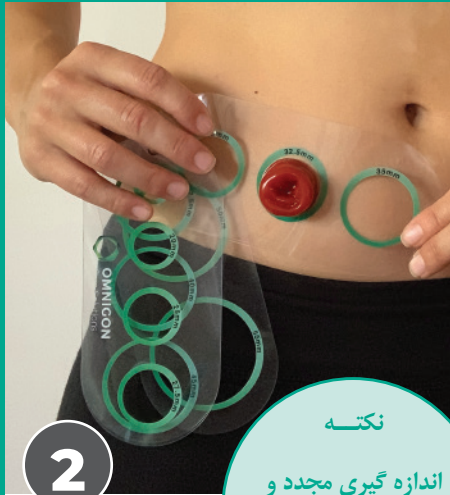


Instructions for use Ileostomy and colostomy

**1**

اگر از یک کیسه قابل برش استفاده می‌کنید،
برش دهید
سوراخ صقحه پایه متناسب با اندازه استومای
شماست
+ ایجاد فاصله 1 تا 2 میلی متری

**2**

اگر مطمئن نیستید
اندازه را دوباره
بررسی کنید

نکته

اندازه گیری مجدد و
متناوب با توجه به امکان
تغییر سایز استوما امری
کمک کننده است

با استفاده از راهنمای اندازه گیری

**3**

قبل از استفاده، خروجی کیسه خود را ببندید

**4**

بعد از اینکه تمیز کردید و
پوست را به خوبی خشک کنید، آن را بردارید
پشتیبان پلاستیک با استفاده از زبانه در
جهت فلش سبز ↑
نمایان شدن قسمت چسب ...

**5**

کیسه خود را از وسط تا کنید، خط بکشید
لبه پایینی بالای سوراخ را به لبه پایینی استوما
و نیمه پایینی فشار دهید.
کیسه در جای خود قرار دهید.

**6**

قسمت بالایی را روی آن تا کنید
استوما و چسب پرس را برای چند ثانیه به
پوست نگه دارید.




7

لایه پشتی نوار چسب و باز کردن خروجی را مشاهده می کنید



8

به آرامی فشار دهید تا طرفین خروجی بازتر شوند و تخلیه را انجام دهید

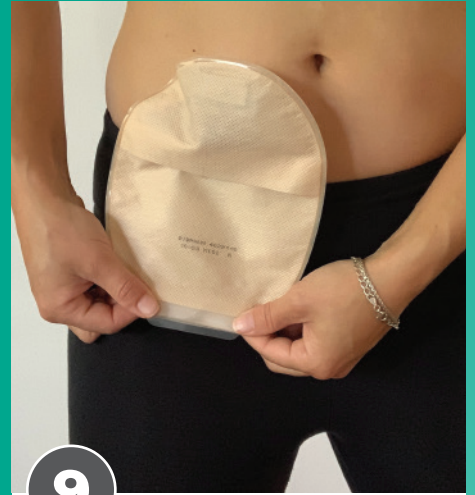

9

خروجی را به سمت خود 4 مرتبه تا کنید چسب ایمن را نیز روی هم قرار دهید

bonco.io



10

در ابتدای خالی کردن کیسه:
بالای کیسه را به آرامی از پوست بگیرید.

توصیه می کنیم از جداکننده ها و محصولات مراقبی استفاده کنید ...



11

در حالی که دستها در دو طرف کیسه قرار دارند، از حرکت رول به سمت پایین استفاده کنید تا چسب را به آرامی از روی پوست جدا کنید، تا زمانی که کیسه کاملاً جدا شود ...