

Flexima Uro Silk

**1**

استوملی خود را اندازه بگیرید و صفحه پایه را به اندازه و شکل مناسب ببرید
پشتی محافظ را از صفحه پایه بردارید و قسمت چسب را در معرض دید قرار دهید

**2**

کیسه خود را از وسط تا کنید، لبه پایینی سوراخ را تا لبه پایینی استوما ردیف کنید و نیمه پایینی کیسه را در جای خود فشار دهید.

**3**

قسمت بالایی را روی استوما تا کنید و چسب را روی پوست فشار دهید.

خالی کردن کیسه

**4**

انتهای کیسه را به سمت کاسه توالت هدایت کنید، شیر آب را به آرامی به سمت راست بچرخانید تا کیسه خالی شود.

**5**

وقتی کیسه خالی شد، شیر آب را به حالت چپ برگردانید تا بسته شود.

**6**

با شروع از بالای کیسه، لبه بالایی را به آرامی از پوست جدا کنید و با دست دیگر از پوست حمایت کنید. کیسه را به سمت پایین و دور از پوست جدا کنید.

استفاده از محصول چسب پاک کننده پزشکی به شدت توصیه می شود.


نکته: گذاشتن مقداری ادرار در کیسه قبل از اتصال کیسه زهکشی شب باعث می شود که راحت تر جریان پیدا کند.



با فشردن بال ها و فشار دادن آن به انتهای شیر، کانکتور را محکم کنید.




درب سبز رنگ را بردارید و کیسه زهکشی شب را به کانکتور وصل کنید.

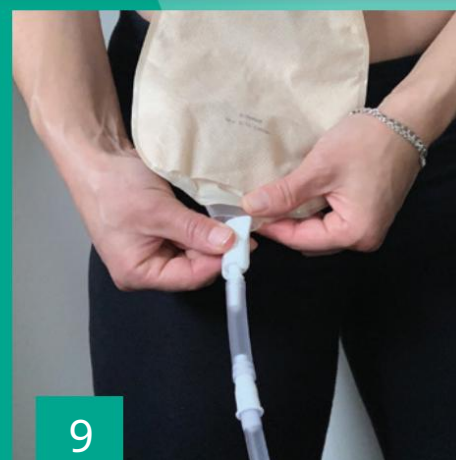

شیر روی کیسه را باز کنید تا ادرار جریان یابد.

اتصال ساده به کیسه زهکشی شب

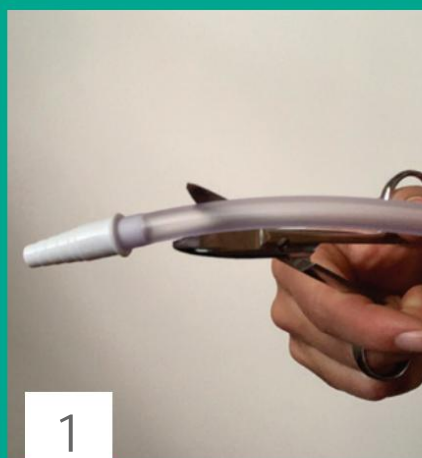

نوک راه راه را از کیسه زهکشی شب جدا کنید.



لوله پلاستیکی را از کانکتور جدا کنید.



کانکتور سفید را در کیسه زهکشی شب قرار دهید.

تخلیه و تمیز کردن کیسه زهکشی شب

کیسه زهکشی شب را با فشار دادن شیر سبز رنگ به طرف توالت خالی کنید. قبل از جدا کردن کیسه زهکشی شبانه، شیر کیسه را ببندید.

10



نکته: کیسه زهکشی شبانه خود را طبق دستور پرستار متخصص خود تمیز و نگهداری کنید